


MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

DISPOSITIVOS INTRAVAGINAIS

Quais cuidados devem ser tomados para limpeza do implante?



1 Ao retirar o implante, lavar em água corrente.

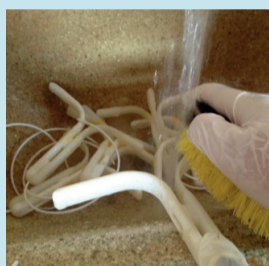


2 Retirar todo o muco aderido com o auxílio de uma escova macia removendo a sujeira grosseira. Passar em soluções desinfetantes apropriadas.



3 Colocar para secar em local sombreado.

Quais cuidados devem ser tomados para armazenamento do implante?

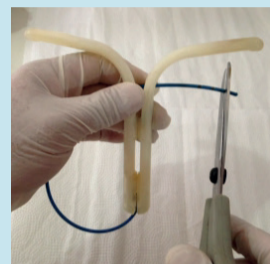

1 Cortar a cauda do implante no local indicado, de acordo com o número de usos. (Utilizar sistema "use controller")



2 Colocar em sacos plásticos limpos.



3 Armazenar em local fresco ou em geladeira.

O QUE NÃO É RECOMENDADO?



Escovar as hastes com muita pressão e com escova inadequada.



Manipular o implante sem luva.



Armazenar o implante sem higienizar.



Deixar o implante de molho em água ou solução desinfetante por mais de 15 minutos.



Deixar secar em locais com poeira e ao sol.